


クリアコレクトって何？

透明なマウスピース型の 「アライナー*」を使った 歯列矯正システム

あなたのためにカスタマイズされたアライナーを約1～2週間ごとに交換・装着することで、段階的にきれいな歯並びへと導きます。

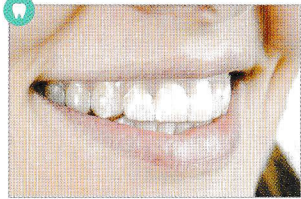


透明で目立たない

ワイヤー矯正と比べ快適で、透明で目立ちにくいのが特長です。




外せて洗えるから清潔

アライナーは取り外すことができ、歯磨きも普段どおりに行えます。

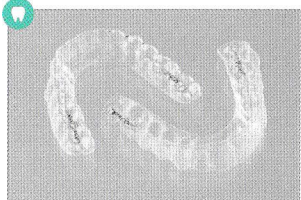

一人ひとりに合わせた治療

治療は患者様の治療計画に合わせて製作した複数の専用アライナーで行います。

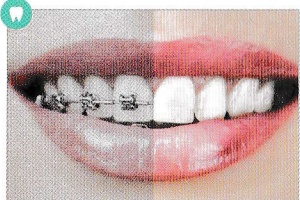

口の中が傷つきにくくて安心

ワイヤーの引っかかりなどによって口内や唇が傷つく心配もありません。

*アライナー: カスタムメイドの透明なマウスピース型矯正装置

clearcorrect Q & A

Q 治療期間は？

A 患者様の症例、また治療計画によって異なります。
歯科医師による診察でおおよその治療期間が決定します。

Q 治療費用は？

A 費用は患者様の症例、治療期間によって異なります。
詳しくは歯科医院にご相談ください。

Q アライナー矯正は痛いですか？

A 一般的にはブラケットやワイヤーに比べ、痛みや不快感が少ないと言われています。※痛みは個人差があります

Q クリアコレクトとはどんなブランドですか？

A アメリカで2006年に誕生して以来、10年以上の販売実績があるブランドです。そして世界100か国以上で歯科製品とサービスを提供している「ストローマン グループ」の一員です。

straumann group

- 症例によってはクリアコレクトによる治療が出来ない場合があります。
- クリアコレクトに関する詳細は、歯科医師に直接ご相談ください。

お問い合わせ先

本冊子は、歯科医師による患者様への治療説明資料としてご利用いただけます。
その他の用途ではご使用になれません。

© Institut Straumann AG, 2017. All rights reserved.
ClearCorrect™およびClearCorrect™ロゴはStraumann Holding AGまたはその子会社の商標および商標登録です。

JPC7004 2019.07 2K

clearcorrect

目立たないクリアな歯列矯正

もっと笑顔で、もっと綺麗に。





歯列矯正をしたくても、
その見た目や治療期間の長さから
なかなか一歩先に
踏み出せなかったあなたへー

「クリアコレクト」で
さあ、思いっきり笑おう。

clearcorrect

治療の流れ



きれいな歯並びへの 5つのステップ

治療の流れ

1. 初診



初診では、クリアコレクト・ドクターが患者様のレントゲン写真および歯の型をとります。

2. 歯科医師による治療計画の作成



患者様の歯の状態に基づいてカスタマイズされた3D治療計画を作成。予測される歯牙の最終位置やおおよその治療期間も判明します。

3. アライナーを製作



治療計画に合わせ、カスタマイズされたアライナーが製作されます。

4. 治療スタート



ドクターからアライナー（通常は2～3セット）を受取り、その日から毎日装着するだけ。1～2週間ごとに新しいアライナーに交換します。

*一日22時間の装着を推奨しています。
*歯磨き、食事の時は外してください。

5. 保定



治療完了後はリテーナーを装着し、後戻りを防ぎます。

治療の効果



幅広い症例に対応する クリアコレクト

治療可能な症例



こうさこうごう
交叉咬合

上下の歯の
交叉



じょうがくぜんとつ
**上顎前突
(出っ歯)**

前歯が突出
している



そうせい
歯生

デコボコした
歯並び



かいごう
**開咬
(オープンバイト)**

上下の歯が
かみ合わない



せいちゅうりかい
正中離開



歯と歯の間に
隙間がある



かがいこうごう
**過蓋咬合
(ディープバイト)**

上の歯が下の歯を
覆い隠している

症例により治療期間は異なります。詳しくは直接歯科医師にご相談ください。

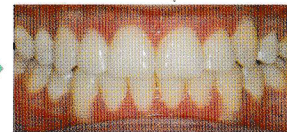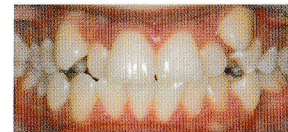

● 治療期間および使用されるアライナーの数は症例により異なります。
● 治療結果は個々の症例により異なります。